

WENTELLAKEN
PW-0350
180 x 350 cm

Proturn®

HOOGWAARDIGE
KWALITEIT
WENTELLAKENS

**Geschikt voor alle
wentelsystemen**



- 50% katoen, 50% poly
- fijne weving
- lage glijweerstand
- minder warm gevoel
- minder kans op wrijvingsplekken
- wasbaar tot 95° C

**CONFIDENCE
IN TEXTILES**
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
getest op schadelijke stoffen:
onschadelijk voor
de menselijke gezondheid

ato form®
voor mensen door mensen



Proturn®



WENTELLAKEN

Wasvoorschrift:

- 95° C machinewas (ca. 4% krimp)
- Drogen in droogtrommel op normale temperatuur
- Evt. strijken op gemiddelde temperatuur

Bevestigen:

- Zet het wentelsysteem aan en plaats beide motorrollen omhoog met de klittenbandzijde naar boven gericht.
- Leg het wentellaken in het midden van het bed met de zachte klittenbandzijde onder.
- Bevestig dit klittenband vanaf het voeteneinde in één glijdende beweging van uw hand aan de rol, terwijl u het laken met de andere hand strak trekt tot het hoofdeinde.
- Het laken moet over de bovenzijde van de rol draaien. Bij een verkeerde bevestiging kunnen lichaamsdelen van de zorgvrager bekneld raken tussen het laken en de rol. De besturing levert alleen een laag vermogen bij het afrollen van het laken en stopt bij overbelasting.
- Wind ongeveer 3/4 van het laken op de motorrol, bevestig hierna het laken aan de andere rol.
- Trek het laken strak totdat het recht ligt, houdt het stiksel in het midden van het bed, zodat er aan beide zijden evenveel laken is.

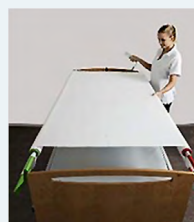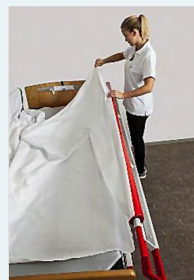

by turnAid
www.turnaid.dk

Raadpleeg voor meer
informatie de handleiding



Bij het niet opvolgen van de instructies of onjuist gebruik vervalt de garantie

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214 | info@ato-form.nl
www.ato-form.nl