

Gebruikershandleiding

CareWell® Change

Artikel nr. DR-ET-CARE



Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Besteed aandacht aan alle instructies en volg deze op.

Maximale belasting: 130 kg.

Laad de accu op voor gebruik.

Als de stoel wordt gebruikt voor het vervoer van de zorgvrager, gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:

- A. De stoel mag NIET naar voren worden gekanteld
- B. De stoel moet in de LAAGSTE stand staan
- C. Neem maximale voorzichtigheid in acht bij rijden op bijvoorbeeld de stoep, enz.
- D. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
Besteed aandacht aan alle instructies en volg deze op. Bewaar de gebruiksvorschriften bij de stoel.

Max. belasting: 130 kg.

Change is CE-gemarkeerd, getest en goedgekeurd volgens ISO/EN 12182:2012.



De Change moet worden gebruikt op een horizontaal oppervlak – de stoel mag nooit worden gebruikt op een hellend oppervlak.

Opladen kan op de stoel



- A. Verwijder de laadstekker van de houder aan de achterkant van de stoel en steek deze in een gewoon stopcontact. Tijdens het opladen zal de handbediening oplichten. Wanneer opladen niet langer nodig is, zal de handbediening groen oplichten.
- B. Plaats de laadstekker weer in de houder als het opladen is voltooid.
- C. Laad de accu **UITERLIJK** op wanneer de indicatoren voor het batterijniveau overschakelen naar de laagste van de drie niveaus.



Laad niet op in natte ruimtes, als de stoel nat is of als er een gebruiker in de stoel zit.

GEBRUIK DE STOEL NIET TIJDENS HET OPLADEN!



OPMERKING! Bij het reinigen van de stoel moeten de motoren volledig naar binnen zijn geschoven.



OPMERKING!

Change is een hulpmiddel voor professioneel gebruik en wij adviseren het product uitsluitend door gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.

Bediening van de stoel

1. De stoelhoogte instellen:

Druk op de bovenste toets in het bovenste vierkant van de handbediening en beweeg de stoel omhoog tot de gewenste stand. Laat de toets weer los. De stoel is nu vergrendeld in deze positie.

Druk op de onderste van de twee toetsen in het bovenste vierkant van de handbediening om de stoel naar een gewenste zithoogte te laten zakken. Laat de toets weer los. De positie van de stoel is nu vergrendeld.

2.a De stoel naar achteren kantelen:

Druk op de rechter toets op het handbedieningskastje in de middelste rij knoppen en kantel de stoel naar de gewenste zitpositie. Laat de toets los. De stoel is nu vergrendeld in deze positie.

Zorg er VÓÓR het kantelen voor dat de pols langs het verticale gedeelte van de geleiderail wordt geduwd, zodat deze er niet uitvalt bij het kantelen.

2.b De stoel naar voren kantelen:

Druk op de linker van de twee toetsen van het handbediening in de middelste rij knoppen en kantel de stoel naar de gewenste zitpositie. Laat de toets weer los. De stoel is nu vergrendeld in deze positie.



LET OP: als de gebruiker in en uit de stoel stapt en als de stoel wordt gekanteld, moeten de wielen van de stoel zijn vergrendeld en de rempedalen van de wielen mogen NIET onder de stoel "wijzen"!



3.a De zitting omhoog brengen:

Druk de linker van de twee toetsen van de handbediening in de onderste rij knoppen in en beweeg de zitting naar de gewenste hoogte.

3.b De rugleuning omhoog brengen:

Druk de rechter van de twee toetsen van de handbediening in de onderste rij knoppen in en beweeg de rugleuning naar de gewenste hoogte.



ZET DE STOEL ONMIDDELIJK STIL ALS DEZE SCHEEF OMHOOG BEWEEGT!

Neem contact op met ATO FORM voor technische ondersteuning. Bel op tel. 0857734214 of e-mail naar info@ato-form.nl.



GA NOOIT OP DE VOETENPLATEN VAN DE VOETSTEUNEN STAAN!

Als de gebruiker sterk naar voren leunt, bestaat het risico dat de stoel kantelt als de voorwielen niet zijn vergrendeld en als de rempedalen niet van de stoel afwijzen.



Bij het in- en uitstappen van de gebruiker moet bijzondere aandacht worden besteed aan eventueel kantelgevaar.

Bedienen van de armleuning



Wees alert op een mogelijke beknelling van weefsels of vingers door het omlaag klappen van de armleuningen!



Instructies voor de voetsteunen

Een voetsteunpaar bestaat uit twee in hoogte verstelbare voetsteunen (één voor de rechter- en één voor de linkervoet).

1. Plaats de voetsteun in de beugel, die aan de voorkant van de stoel is gelast. Aan elke weerszijden van de beugel is een gleuf waarin de "knoppen" van de voetsteun naar beneden glijden, waardoor de voetsteun voor zijwaarts draaien wordt vergrendeld.

2. Als u de voetsteun opzij wilt draaien, breng de voetsteun dan ruim 1 cm verticaal omhoog - dit is het gemakkelijkst in de kromming: Daarmee schuiven de "knoppen" van de voetsteunen uit de gleuven en de voetsteun kan nu zijwaarts worden gedraaid.

3. De voetsteun kan in de lengte worden versteld door de vergrendelingsclip te verwijderen en vervolgens de binnenbuis van de voetsteun op de gewenste lengte te trekken of te duwen.

Denk eraan: De vergrendelingsclip van de voetsteun moet na het instellen weer op zijn plaats worden gezet.

4. De hoogte van de rollen kan met de sterknop aan de achterzijde worden afgesteld.



Tijdens het instellen moet rekening worden gehouden met het altijd aanwezige risico van beknelling.



Deze gleuven kunnen scherpe randen hebben, waaraan u zich kunt openhalen wanneer de voetsteunen niet op een stoel zijn gemonteerd.

Reiniging en onderhoud

Bij ongebruikelijke geluiden en/of onregelmatig lopen van de motor stopt het kantelen. Neem indien nodig contact op met de dealer/fabrikant. De reiniging wordt uitgevoerd met niet-corrosieve reinigingsmiddelen, waarna de stoel moet worden afgespoeld. Het daaropvolgende afdrogen doet u bij voorkeur met een zachte doek.

Armleuningen, rugleuningen, beensteunen en wielen moeten regelmatig worden gecontroleerd en vrij gehouden van haren enz. om een optimaal gebruikt te kunnen worden.

Extra accessoires

Zie www.ato-form.nl

OVER ONS

ATO FORM staat voor kwaliteit en zelfstandigheid in leven. Voor meer dan 35 jaar staat ATO FORM in Europa bekend als specialist in revalidatie en orthopedische hulpmiddelen.

Door professioneel advies en uitstekende kennis & ervaring streven wij ernaar te voldoen aan de individuele behoefte van mensen die zorg en hulp nodig hebben. Onze producten veranderen hun leven, door het herwinnen van zelfstandigheid en comfort. Daarbij zijn onze producten ontworpen om de fysieke belasting van zorgverleners te minimaliseren.

