


Matras EasyCare M

Drukverlagend matras met 2 schuimkernen ter preventie van decubitus

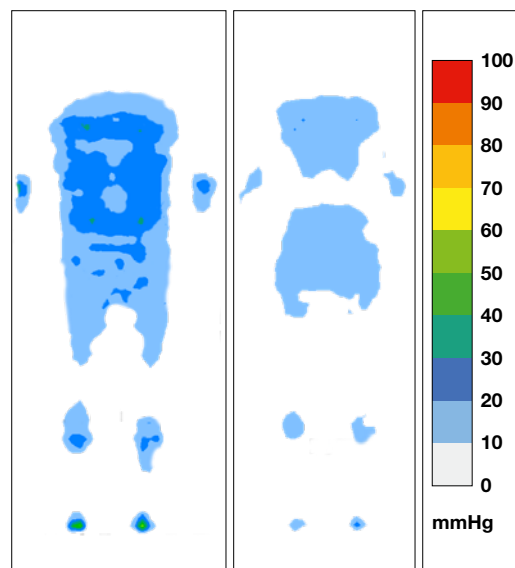

Feiten:

Afmeting: 200 x 90 x 14 cm.

Neem voor andere maten contact op met ATO-FORM.

Functie: als hulpmiddel ter preventie en behandeling van decubitus tot en met wondcategorie 4.

Aanbevolen gebruikersgewicht: tot 150 kg. Als de matras wordt gebruikt in combinatie met Turn All wisselingsysteem tot 225 kg.

Kernen: HR PUR schuim.
Dichtheid: 50 Kg/m³
Hardheid kPa: HR52120 - 3,0

Voldoet aan:
Oeko-Tex Standard 100,
Productklasse I, certificaatnr. I 308026.

Brand: Californië TB 117-2013 sec. 3

Hoes: medisch Bi-elastisch PU.

Reiniging van de hoes: afvegen met reinigingsmiddel en/of ontsmettingsmiddel. Machinewas op max. 95°C, droger op lage temperatuur. Zie ommezijde.

Garantie: 2 jaar.



Het Matras EasyCare M is opgebouwd uit 2 afzonderlijke hoogwaardige schuimkernen die allebei in tricot gehuld zijn, waardoor de kernen over elkaar heen glijden zodat de schuifkracht bij de patiënt wordt verminderd. Het glijden van de kernen heeft ook een gunstig effect op de drukverdeling bij het omhoogbrengen van het hoofd- of voeteneinde van het bed.

De schuimkernen zijn plaatselijk uitgesneden voor een optimale drukverdeling van de drukpunten op het lichaam. De uitsneden bieden ook optimale flexibiliteit bij het omhoogbrengen van het verpleegbed evenals bij het gebruik van het Levabo Turn All automatisch wisselingsysteem.

De uitsneden zijn aan het hoofd- en voeteneinde hetzelfde, waardoor het matras kan worden omgedraaid voor een langere levensduur van het product.

Matras EasyCare M is ontwikkeld voor gebruik in instellingen, verpleeghuizen en de thuiszorg.

De hoes is waterdicht en ademend en bestaat uit hygiënisch materiaal dat in alle richtingen gestretcht kan worden. De hoes is ademend (dampdoorlatend), wat helpt bij het verminderen van het risico op maceratie van de huid.

De hoes is aan 3 zijden voorzien van een afgedekte rits, waardoor deze eenvoudig van het matras kan worden afgenomen om gewassen te worden. De hoes is voorzien van vier handgrepen voor een gemakkelijk gebruik van het matras.

Artikelnummer: TZB-1000M

Het Matras EasyCare M reinigen

Matras EasyCare M

Voordat de hoes van het Matras EasyCare M gewassen kan worden, moet eerst het binnenste schuimmatras worden verwijderd (zie afbeelding rechts). Open de rits en verwijder het schuimmatras voorzichtig.

Zorg ervoor dat het schuimmatras weer in dezelfde positie terug in de hoes gelegd wordt. Het schuimmatras kan niet in de wasmachine worden gewassen.

Het binnenste schuimmatras reinigen

Gebruik de zachte opzetborstel van de stofzuiger om vast vuil of stof in het schuim te verwijderen. Zorg ervoor dat je voorzichtig drukt om dieper gelegen vuil te verwijderen.

Leg een zeildoek buiten naast je tuinslang neer en leg het schuimmatras erop.

Meng een vloeistof bestaande uit één deel mild reinigingsmiddel en twee delen water. Meng de oplossing zorgvuldig en spuit deze op het gehele schuimoppervlak. Laat de oplossing ongeveer 30 minuten intrekken en spoel deze daarna uit met de tuinslang.

Druk op het schuim om het opgezogen water te verwijderen. Zorg ervoor dat het matras niet gedraaid wordt, maar vouw het voorzichtig en druk er zachtjes op, zodat het schuim niet scheurt of uitrekt.

Leeg de spuitfles, spoel deze uit en vul hem nu met een oplossing bestaande uit één deel wit gedestilleerd azijn en vier delen water. Spuit de oplossing opnieuw op het volledige oppervlak van het schuimmatras en spoel het geheel af met de tuinslang.

Druk nogmaals op het schuim om het opgezogen water te verwijderen. Zorg ervoor dat het matras niet gedraaid wordt, maar vouw het voorzichtig en druk er zachtjes op, zodat het schuim niet scheurt of uitrekt. Plaats het schuimmatras naast een elektrische ventilator om te drogen. Controleer het schuim op vocht voordat u het weer in gebruik neemt. Het matras moet volledig droog zijn voordat de hoes er weer omheen gedaan wordt. Zorg ervoor dat het schuimmatras weer in dezelfde positie terug in de hoes gelegd wordt.

Tip

Als je in een flat woont, kunnen deze stappen ook onder de douche of in de badkuip uitgevoerd worden als je een afneembare douchekop heeft.

Hoes (de blauwe hoes)

De Matras EasyCare M hoes kan in de wasmachine op 95° C gewassen en in de droger op lage temperatuur gedroogd worden.

Als het Matras EasyCare M met lichaamsvloeistoffen in aanraking is gekomen, kan het worden gedesinfecteerd


De Matras EasyCare M hoezen kunnen worden gedesinfecteerd met een geschikte desinfectans zonder chloor, b.v. met een ontsmettingsmiddel met een medium antimicrobiële werking dat ethanol/alcohol met een sterkte van 70-85% bevat.

Het schuimmatras kan worden gedesinfecteerd met een geschikte desinfectans zonder chloor, b.v. met een ontsmettingsmiddel met een medium antimicrobiële werking dat ethanol/alcohol met een sterkte van 70-85% bevat. Laat het geheel goed drogen voordat de hoes er weer omheen gedaan wordt.




Verwijderen van het schuimmatras

Open de rits

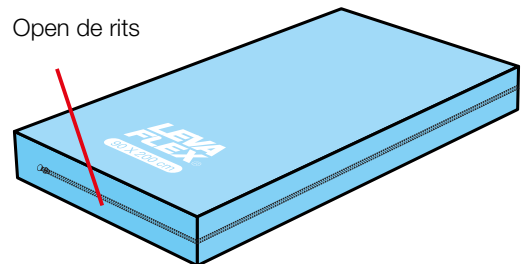

Haal het matras voorzichtig uit de hoes

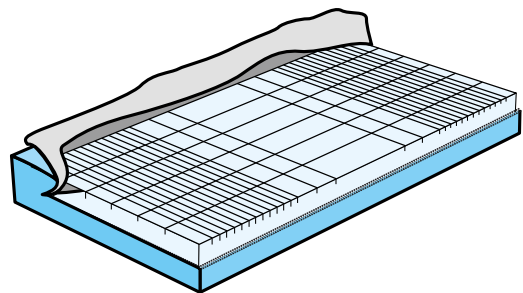

Let op: het matras bestaat uit een bovenkant en een onderkant. Het is belangrijk dat de onderdelen correct zijn uitgelijnd wanneer de hoes weer over het matras wordt gedaan.

