

Snelgids - TurnAid

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

1. Bedhek positie aanpassen:

Zorgvrager van rug naar zij wentelen: motorrol omhoog kantelen



A. blauwe knoppen aantrekken



B. bedhek naar beneden duwen tot de klik (=vergrendeld)



C. motorrol staat omhoog, klaar voor wentelen zorgvrager



Voorkom overbelasting en schade:

Zorg ervoor dat u 'Bedhek omlaag klappen' (2) niet uitvoert als de rol nog omhoog staat, zoals te zien in plaatje C. Breng eerst de rol omlaag, dan kan het bedhek naar beneden worden geklapt voor een transfer.




2. Transfer in en uit bed:

bedhek omlaag klappen na het aantrekken van de zwarte knoppen

3. Bedhek omhoog bij verlaten zorgvrager

4. Het aanbrengen van een nieuw glijlaken:

- Leg het glijlaken op het matras en plaats de elastieken om iedere hoek van het matras.
- Breng het hoofd (1) en voeteneinde (2) van het matras omhoog.
- Bevestig de klittenbandstroken aan het inlegraam, waarop het matras ligt (zie onderstaande foto's)

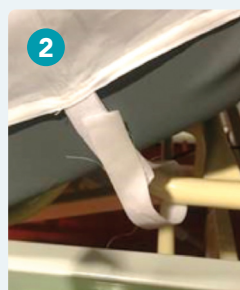

Een juiste werkhouding vereist een gemakkelijke verplaatsing van de zorgvrager naar de zorgverlener met de motorrol. Ongeacht de positie van het bedhek, biedt de motorrol unieke voordelen voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener.

Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van TurnAid



Bij het niet opvolgen van de instructies of onjuist gebruik vervalt de garantie

LED Snelheidsindicator

Het 'AAN' lampje.

Deze brandt geel wanneer het systeem actief is.

Snelheidsbediening:

Bepaalt de snelheid waarmee de motorrollen wentelen. Deze is aan te passen tussen 50%, 75% en 100%

De bedieningsknop voor het oprollen. Hierdoor neemt de spanning op het laken toe en kunt u de zorgvrager draaien of verschuiven.

Voorkom overbelasting en schade:

Bij verkeerd gebruik raken de motors overbelast. Zorg ervoor dat het matras plat ligt, zowel bij het hoofd- als voeteneinde. Hierdoor is de weerstand op het wentellaken evenredig verdeeld over de rollen, en raken de motors niet overbelast. Daarbij moet er altijd een glijlaken bevestigd zijn op het matras, direct onder het wentellaken.

AAN/UIT KNOP:
Activeer de TurnAid door deze knop tweemaal ± 1 seconde in te drukken. Druk eenmaal om te activeren uit slaapstand ('AAN' lampje knippert).

Tevens de noodstop:
Druk de knop langer dan 2 seconden in. Deze brandt geel wanneer het systeem actief is.

De bedieningsknop voor het afrollen van het wentellaken. Hierdoor neemt de spanning op het laken af.

Let op bij rug- en/of beenverstelling:
Voor rug- en/of beenverstelling is het noodzakelijk dat het wentellaken genoeg ruimte biedt om deze handeling uit te kunnen voeren. Rol beide motorrollen tegelijkertijd iets af, zodat het wentellaken in het midden blijft.


Montage

Monteer de TurnAid zoals rechts afgebeeld om beknellingen en verwondingen te voorkomen.

De groene rol moet rechts gemonteerd worden en de rode rol links vanuit het perspectief van de zorgvrager.

LET OP: De zorgvrager dient tijdens het wentelproces te allen tijde de rollen en het hekwerk niet aan te raken.

RECHTS
van de
zorgvrager

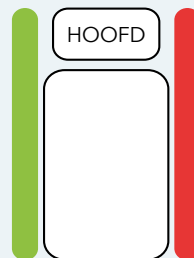

LINKS
van de
zorgvrager

Bediening voor het oprollen van de rode en groene motorrol -> strekken van het wentellaken.



AAN knop.
Druk 2 maal voor activatie

Bediening voor het afrollen van de rode en groene motorrol -> losmaken van het wentellaken.

Snelheidsbediening

Raadpleeg voor meer informatie
de handleiding van TurnAid



Bij het niet opvolgen van de instructies of onjuist gebruik vervalt de garantie

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214 | info@ato-form.nl
www.ato-form.nl