



**JOUW
SPECIALIST
IN ZORG-
OPLOSSINGEN**

WISSELLIGGINGEN
UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN






4

UITDAGING 1

Hoe voorkom je dat de zorgvrager wakker wordt?

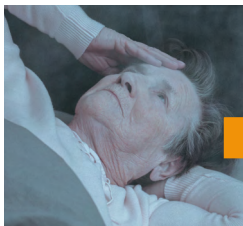

6

UITDAGING 2


Hoe voorkom je angst voor wegglijden bij de zorgvrager?



8

UITDAGING 3

Hoe voorkom je onnodige stress bij de zorgverlener?

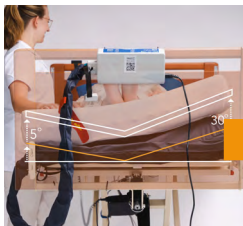

9

GEBRUIK TURN ALL

Hoe werkt de Turn All en wanneer is deze inzetbaar?



MINDER GELUID

BETERE SLAAP

BEHOUD EIGEN MATRAS

UITDAGING 1

Handmatige herpositionering of wissel-
liggingen met een wisseldruksysteem
maken de zorgvrager wakker

OPLOSSING TURN ALL

- de zorgvrager wordt automatisch en zacht herpositi-
oneerd en hoeft niet wakker gemaakt te worden, wat
voor een betere slaapkwaliteit zorgt
- door de betere slaapkwaliteit heeft de zorgvrager
overdag meer energie over
- de motor maakt alleen geluid op de momenten dat
het systeem van kant wisselt
- kan op elk verpleegbed met een afneembaar matras
geplaatst worden waardoor de zorgvrager niet hoeft
te wennen aan een nieuw matras



UITDAGING 2

De zorgvrager ervaart tijdens een zijdelingse lift een onveilig gevoel vanwege angst om weg te glijden

OPLOSSING TURN ALL

- de Turn All plaatst de zorgvrager afwisselend aan de rechter- en linkerkant in een zijligging van 30°
- de tegenoverliggende zijde wordt tegelijkertijd met 5° verhoogd waardoor het risico op schuifkrachten geminimaliseerd wordt
- dit speciale ondersteuningssysteem vermindert het gevoel van wegglijden waardoor de zorgvrager zich veiliger voelt

SPECIAAL ONDERSTEUNINGSSYSTEEM

VEILIGER GEVOEL

AFNAME SCHUIFKRACHT



EENVOUDIGE INSTALLATIE

SNEL INZETBAAR

MINDER REINIGING

UITDAGING 3

Goede handmatige herpositionering en/of wisselingsystemen vereisen vaak veel (technische) kennis, uitleg en handelingen

OPLOSSING TURN ALL

- de Turn All is zeer eenvoudig te plaatsen, technische kennis is niet vereist
- door de eenvoudige installatie kan het systeem snel in gebruik worden genomen
- doordat de Turn All onder het matras wordt geplaatst, is er minder reiniging nodig en is het systeem minder gevoelig voor beschadigingen

VOORDELEN EN GEBRUIK

Voordelen:

Laterale lift van het matras tot 30°

Ondersteuningssysteem van 5°

Tot wel 225 kg belastbaar (obese versie tot 400 kg)

Drie verschillende draaicyclussen van 30/30, 60/60 en 90/90 minuten

Kan op elk verpleegbed met een afneembaar matras geplaatst worden

Uitermate geschikt voor het voorkomen en behandelen van decubitus

Zeer stil tijdens gebruik

Bevordert de slaapkwaliteit van de zorgvrager

Eenvoudig en snel in te stellen

Eenvoudig te reinigen

Voor een gratis
proefplaatsing
kijk op:



Geschikt voor gebruik bij:

Ruggermergletsel veroorzaakt dwarslaesie en quadriplegie (met of zonder ventilator)

Spierdystrofie

Multiple sclerose

Ernstig hoofdletsel en be-roerte

Ernstige aandoeningen van de luchtwegen, zoals chronische obstructieve longziekte

Immobiliteit door ouderdom

Kanker

Guillain-Barré syndroom

AIDS

Coma

Amputaties

Osteomyelitis

Degeneratieve schijfziekte

Post spinale fusie en laminectomie

Reumatoïde artritis

ALS

INSTALLATIE TURN ALL





Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 -77 34 214
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl